



RONFLEMENTS ET APNEES DU SOMMEIL RETROUVEZ UN SOMMEIL EFFICACE

CANULE APNDOR

Contre le ronflement et les apnées du sommeil



La canule Apndor est légère, par sa souplesse elle permet la déglutition de la salive et ne provoque aucune blessure.

Le passage de l'air se trouve facilité jusqu'au larynx.

La respiration nocturne se fait parfaitement avec tous les avantages qui en découlent, en particulier le retour à un sommeil naturel sans ronflement.

Retrouvez un sommeil efficace avec la Canule APNDOR

Canule de nouvelle génération, conçue pour les patients souffrant d'apnées du sommeil.

Elle peut sauver la vie!

Son utilisation pratique, ne vous dispense pas d'un contrôle médical malgré son efficacité.

Sa forme est particulièrement aisée pour l'introduction en bouche, jusqu'à la zone d'apnée et de ronflements, derrière la langue.

Conseils d'utilisation de la Canule APNDOR

Nouvelle Génération

La canule APNDOR, n'est pas un système universel pour le traitement de l'apnée et dans certains cas, elle ne pourra pas remplacer la ventilation par pression positive continue ou C.P.A.P. (Continuous Positive Airway Pressure)

- **Un suivi médical reste indispensable**

Le tube souple de la canule Apndor est en silicone médical, anallergique.

- **Le tube se retire facilement en cas d'urgence**

Il vous faudra quelques jours voir quelques semaines pour vous y habituer. Faites cet effort, vous ne le regretterez pas.

Entretien de la Canule APNDOR

L'entretien est facile, Il suffit de la nettoyer chaque matin sous l'eau froide savonneuse, en passant éventuellement un coton tige à l'intérieur du tube de la canule si des mucosités se sont déposées.

Afin d'avoir une désinfection complète, nous vous conseillons de la faire tremper quotidiennement, dans un verre avec une pastille de produit désinfectant, comme pour une prothèse dentaire.

Suivre le mode d'emploi des pastilles désinfectantes et bien rincer la Canule Apndor avant de la réutiliser.

Un bon entretien de la canule Apndor doit pouvoir vous permettre une utilisation satisfaisante. Le renouvellement est ensuite nécessaire au bout d'un an pour des raisons de contamination microbienne et de sécurité.

CE PRODUIT EST RESERVE AUX ADULTES.

Ce n'est pas un jouet et il doit être tenu hors de la portée des enfants.

Informations complémentaires importantes

La canule Apndor doit vous rendre un grand service.

Il est nécessaire que votre organisme s'habitue à ce corps étranger, comme pour toutes les prothèses qui servent à compenser un déficit, que ce soit une prothèse dentaire, auditive, lunettes, lentilles de contact ou autre.

Une adaptation progressive est inévitable et doit aboutir presque toujours à une tolérance satisfaisante. Cette période va de quelques jours à 3 semaines.

La difficulté principale pour la tolérance de l'Apndor est le réflexe nauséux. Très variable selon les personnes, certaines auront un réflexe dès que le tube touchera la langue. L'accoutumance devra donc être très progressive selon les cas.

Notre objectif :

Vous faire profiter de notre expérience, qui ne doit en aucun cas venir contredire les ordres ou conseils de votre médecin avec lequel vous devez garder un contact suivi.

L'apnée du sommeil peut avoir des origines diverses, que le médecin traitant votre problème peut seul connaître. C'est donc ce dernier qui reste décisionnaire sur la prescription à suivre.


De fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité sur l'utilisation de la Canule Apndor.

Méthode d'utilisation conseillée

- Votre gorge doit progressivement s'habituer à ce corps étranger.
- Ne mettez pas la Canule Apndor en bouche avant de vous coucher, vous ne pourriez certainement pas la supporter.
- Faites vos premiers essais dans la journée. Introduisez doucement, le bout du tube souple dans la bouche, gardez-le quelques secondes, puis de plus en plus longtemps. Sucez le tube, avalez la salive, mâchonnez-le, pour vous habituer progressivement à cette présence.

N'insistez pas les premiers jours, enfoncez la canule, un peu plus loin chaque fois dans la gorge, sans chercher à la mettre en place (fig. n°1).

Renouvelez le plus souvent possible l'expérience dans la journée par de brèves tentatives.

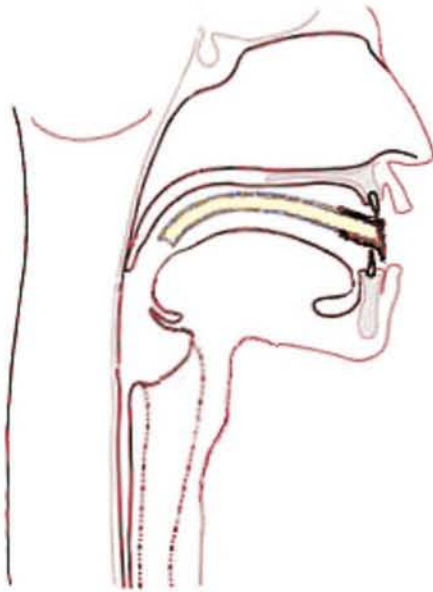

- Les dents doivent reposer sans serrer, sur la partie dure de la canule à positionner suivant (fig. n°1)

Le rebord de la canule se loge entre les dents et la lèvre inférieure.

Fig. n°1

Si les réflexes nauséeux sont importants, enfoncez le tube moins profondément.

Dès que vous serez habitué à la présence de la canule Apndor, vous pourrez alors la mettre en place.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, vous pouvez aussi insensibiliser votre gorge.

Sucez 5mn avant l'introduction du tube, deux comprimés pour calmer les maux de gorge, (vente libre en pharmacie), ou prenez une cuillère à dessert de gel visqueux anesthésiant local plus puissant.

Ce produit n'est délivré que sur ordonnance, votre médecin pourrait accepter de vous le prescrire.

Au bout de quelques jours vous devriez sans difficulté mettre la Canule Apndor en place dans la bouche sans anesthésiant local et la supporter toute la nuit.

La souplesse du tube permet la déglutition de la salive et ne provoque que peu de gêne. Le passage de l'air se fait parfaitement jusqu'au larynx avec tous les avantages qui en découlent et en particulier le retour à un sommeil naturel et normal.

De temps en temps, il est possible pendant la nuit, que votre Canule APNDOR ne soit plus en bouche ce qui est fréquent. Vous l'aurez retiré par un réflexe inconscient en dormant.

Remettez-la en place. Cela se produira de moins en moins souvent.

Chez certaines personnes, le port de la canule APNDOR assèche la bouche ou au contraire pour d'autres, saliver plus qu'à la normale. Ce phénomène se produit avec le port de toutes prothèses ou appareils dentaires, on s'y habitue rapidement.

Soyez patients, confiants et persévérants !

Pour dormir enfin, avec La Canule APNDOR

- Allez vous coucher et détendez vous.
- Ne mettez pas la canule Apndor en place dans la bouche avant de vous coucher vous auriez un excès de salive.
- Couchez vous et attendez que le sommeil arrive. A ce moment, introduisez la canule Apndor dans la bouche et mettez la en place.
- Relâchez votre mâchoire, détendez-vous, la salivation sera moins importante. Si celle-ci persiste, mettez vous sur le dos afin de pouvoir déglutir facilement.

- Le sommeil arrivant, vous sentirez moins la présence de la canule et vous pourrez vous endormir sur le côté.
- Vous serez libre de tous vos mouvements.
- Il est possible que vous soyez réveillé quelques fois au cours des premières nuits.
- En dormant et inconsciemment, votre langue chassera la canule. Cette réaction instinctive est absolument normale et sera de moins en moins fréquente.
- Progressivement votre corps s'habituerà à cette présence pendant le sommeil

PixelPro SAS ne pourra être tenue pour responsable d'accidents survenus lors d'un usage anormal et hors contrôle d'un médecin. Le ronflement et les apnées obstructives du sommeil peuvent avoir des conséquences graves.

Vous devez impérativement consulter votre médecin traitant, avant toute utilisation de la canule Apndor.
Les conséquence d'un usage non adaptée ne peut en aucun cas engager notre responsabilité de concepteur, fabricant ou distributeur.

La fabrication est réalisée avec des matériaux analgésiques par un laboratoire spécialisé dans la fabrication de sondes médicales et chirurgicales.

PixelPro SAS service APNDOR
22 rue des Sablons
75116 Paris

info@apndor.fr
Fax 09 56 42 00 18
www.apndor.fr